


NOTA TÉCNICA Nº 03/ 2022 – LACEN/SUVISA/SESAB

Assunto: Orientação para o envio de tubo de coleta primário para realização das análises laboratoriais com amostra de soro no LACEN/Ba.

A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, por meio do Laboratório Central de Saúde Pública Professor Gonçalo Moniz, orienta as equipes de Vigilância Epidemiológica, os Laboratórios Municipais de Referência Regional (LMRR) e Laboratório Estadual de Referência Regional (LERR), quanto ao envio de tubo de coleta primário para realização das análises laboratoriais com amostra de soro no LACEN/Ba.


Nesta perspectiva, a fim de viabilizar a preservação e integridade da amostra biológica e a correta identificação da amostra do paciente, o LACEN define:

1. As amostras devem ser coletadas com tubo contendo gel separador;
2. As amostras não devem ser fracionadas em tubos secundários;
3. As etiquetas devem ser fixadas preservando a parte da amostra de forma visível para avaliação da condição e volume da amostra;
4. As etiquetas devem ser fixadas na altura da tampa conforme imagem abaixo:

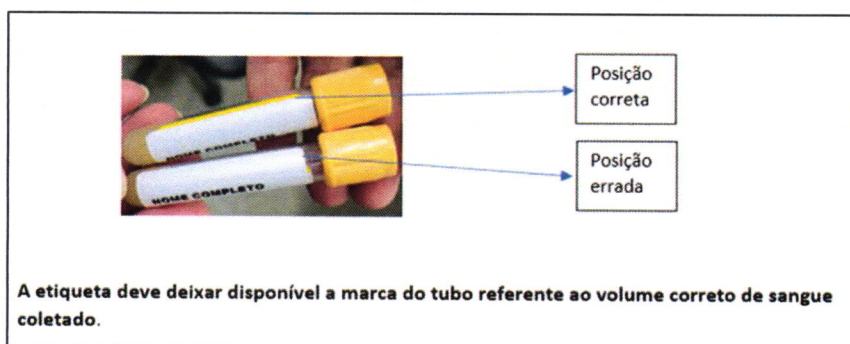

5. As amostras devem ser encaminhadas cadastradas pelo sistema GAL para o LACEN/Ba e na ausência de etiquetas código de barras, realizar identificação manual contendo obrigatoriamente as seguintes informações:

- Nome completo e sem abreviações
- Data de nascimento

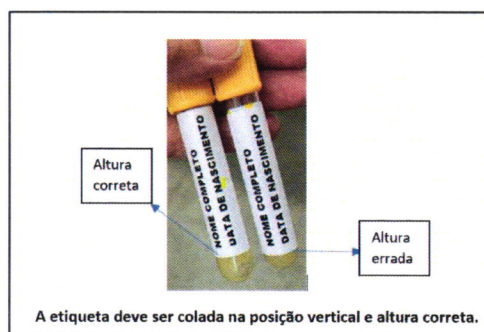

6. O transporte da amostra biológica sem centrifugação das unidades de coleta para o LMRR deve ser na posição vertical;


7. Quanto a centrifugação, o tempo mínimo de retração de coágulo recomendado antes da centrifugação para tubos COM GEL é de 60 minutos e COM GEL contendo ativador de coágulo é de 30 minutos e a centrifugação deve ser realizada por 10 minutos a 3000 rpm para ambos os tubos;

8. Para as amostras coletadas em tubo primário com gel separador e que não forem utilizadas para processamento imediato, após centrifugação, recomenda-se refrigerar 2°C a 8°C por 2 horas antes do congelamento em galeria na posição vertical. Após este período, congelar por um período $\geq$ a 2 horas a temperatura -20°C;


9. Os tubos devem ser transportados para LACEN, centrifugados, na posição vertical e acomodados em galerias plásticas para minimizar a movimentação dentro da caixa de transporte. As galerias devem vir dentro de saco plástico (embalagem secundária do transporte);

NOTA 1: Na ausência de galeria padrão, o transporte das amostras pode ser realizado utilizando as embalagens dos tubos de coleta, ou ainda transportar os tubos dentro de sacos plásticos, mantidos em posição vertical e presos na parede da caixa de transporte com fita adesiva para evitar que o tubo fique na posição horizontal durante o transporte.

10. As amostras coletadas em tubo SEM gel separador não podem ser encaminhadas LACEN/Ba.

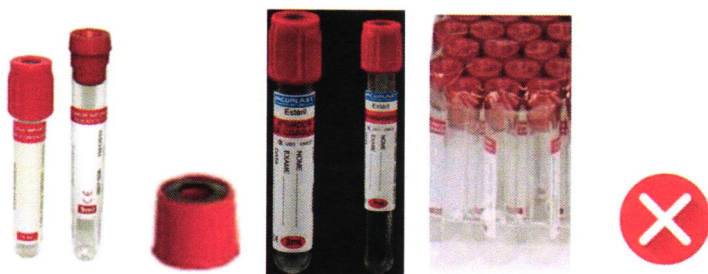


Modelos de tubos COM gel separador e ativador de coágulo disponibilizados no mercado para uso e podem ser encaminhados para o LACEN/BA:

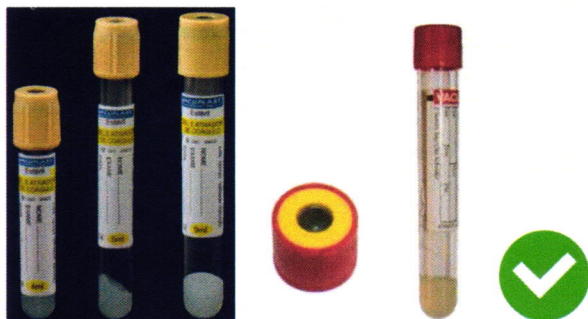

NOTA 2: Está **PROIBIDO** transportar de tubo de vidro para o LACEN/BA.

NOTA 3: A unidade coletadora deve avaliar os tipos de exames a serem encaminhados para o LACEN/BA. Para os pacientes que possuem múltiplos exames, como por exemplo dosagens hormonais, marcadores tumorais e doenças infecciosas, que serão direcionados para setores internos distintos do LACEN/Ba, deve-se coletar e encaminhar no mínimo dois tubos.

Salvador, 23 de maio de 2022.

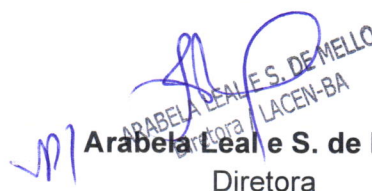
ARABELA LEAL S. DE MELLO
Diretora
LACEN-BA